

|X| MEDICAL
SKINCARE TECHNOLOGY

ORION XPRO

MICRO-NEEDLE CELLULAR ENERGY SYSTEM

INTRODUCCION

ORION XPRO, *micro-needle celular energy system*, de XMEDIKAL es un dispositivo innovador de última generación, que combina tres tecnologías en un solo equipo, micro-needling , corrientes electromagnéticas (EMS) y terapia de luz Led.

Las corrientes EMS penetran a través de los microcanales, estimulando la producción de ATP y con ello incrementando los niveles energía intercelular, favoreciendo de este modo el trabajo de los fibroblastos y aumentando la síntesis de colágeno y elastina.

Con la terapia de luz Azul podremos calmar y equilibrar el acné, y reparar las pieles sensibles.


Con la luz Roja promovemos la regeneración de colágeno y elastina, reducimos los poros y aumentamos la luminosidad.

Con Orion XPro puedes ofrecer una solución mínimamente invasiva para tratamientos estéticos y ofrecer una solución integral para mejorar la estética de la piel.

CONCEPTO

Conozcamos las tecnologías que pueden actuar en sinergia o por separado, para conseguir y personalizar el tratamiento dirigido a la piel de la zona a tratar:


- **Micro- needling** utiliza microagujas para crear microlesiones controladas en la superficie de la piel, este innovador dispositivo estimula el proceso de curación natural de la piel, promoviendo la producción de colágeno y elastina y así conseguir mejorar la firmeza, la elasticidad y la juventud. Al mismo tiempo estas microlesiones controladas generan canales a través de la piel que también facilitan la absorción de los activos dirigidos del tratamiento a tratar, lo que conduce a resultados más efectivos y duraderos, al mismo tiempo que la piel recibe los componentes necesarios para su cambio.
- **Microcorriente (EMS)** penetran a través de los micro canales, estimulando la producción de *ATP* y con ello incrementando los niveles energía intercelular, favoreciendo de este modo el trabajo de los fibroblastos y aumentando la síntesis de colágeno y elastina.
A demás poseen otras cuatro acciones más muy interesantes ante este tratamiento.
 - Mejora la actividad celular y activa la circulación sanguínea para promover una mayor oxigenación y

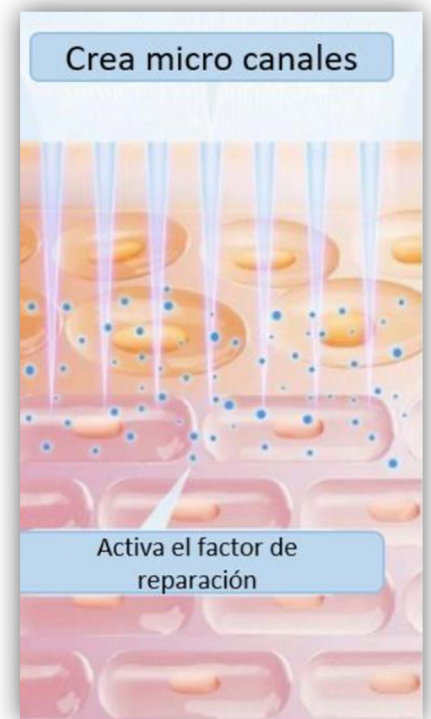

reparación de la piel intensificando la estimulación de la producción de colágeno y elastina del micro-needling.


- Potencia la introducción de activos realizada también con el microneedling
- Estimula la recuperación muscular, restaurando la elasticidad de la piel y promoviendo una apariencia más firme y contorneada.
- Produce un efecto sedativo al sistema nervioso mejorando la tolerancia y la sensación del tratamiento.

- **Tecnología de terapia de luz:** posee dos luces Led integradas para fortalecer la acción del objetivo del tratamiento; Luz azul (470nm) se dirige a las bacterias que causan el acné, reduciendo los brotes y la inflamación lo que resulta en una mejor textura, tono y claridad de la piel. O la Luz roja (640nm): para la estimulación de la producción de colágeno y elastina y mejora la reparación de la piel.

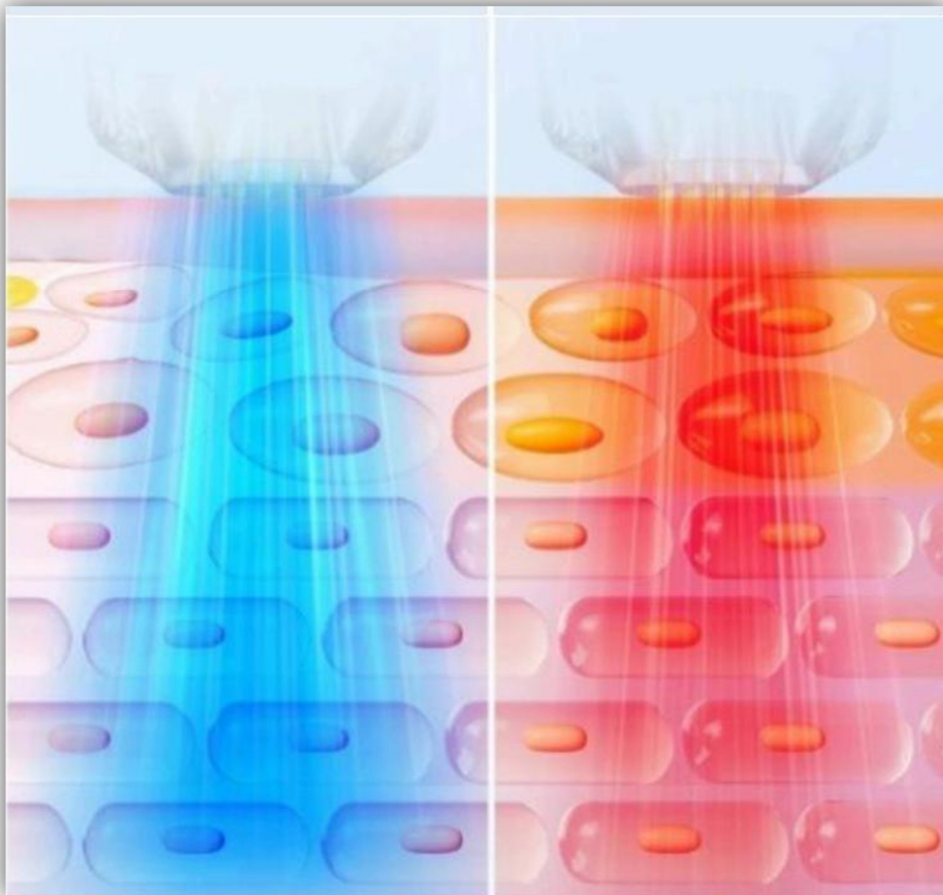

EMS-electroporation micro-needle

Estimula las células y acelera la formación de colágeno y elastina

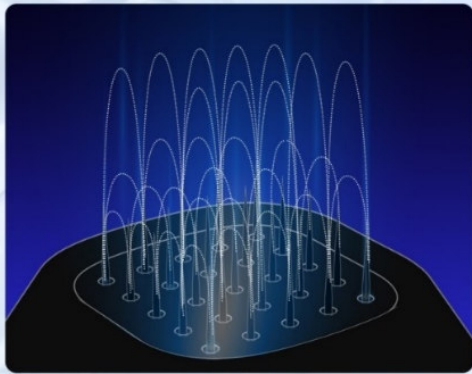

EMS Microcurrent energy field

The ingenious arrangement of positive and negative poles allows each adjacent needle to form countless combinations of network forms, thus forming a dense microcurrent energy field.

Reparar la piel con Microneedling

Crea microlesiones controladas en la superficie de la piel. Para iniciar la reparación de la piel e introducir activos.

EMS

Potencia la acción del microneedling al mismo tiempo que estimula la circulación sanguínea, la recuperación muscular y genera un efecto sedativo

470 nm Luz azul

Reduce bacterias, calma, suaviza el tono. Repara la sensibilidad y el exceso de grasa en la piel.

630 nm luz roja

Crea colágeno, regenera y cierra los poros. Incrementa la elasticidad de la piel, unifica el tono y su luminosidad.

ORION XPRO

MICRO-NEEDLE CELLULAR ENERGY SYSTEM

Con Orion XPro puedes ofrecer una solución mínimamente invasiva para tratamientos:

- Reducir las arrugas y las líneas finas
- Estimular el crecimiento del cabello
- Mejorar la producción de colágeno de la piel
- Mejorar la absorción de activos
- Reducir la inflamación
- Conseguir un tono de piel uniforme
- Mejorar la textura de la piel
- Reducir la aparición de cicatrices y estrías
- Reducir los poros
- Disminuir la hiperpigmentación


A close-up photograph of a hand holding a black Orion XPRO micro-needle device. The device has a blue light at the tip and a blue light on the handle. The hand is holding the device over a person's face, specifically near the nose. The device has a dial with settings 0.25, 0.5, 1, and 2.5. The text 'ORION XPRO' is visible on the handle, along with 'SKINCARE TECHNOLOGY'. There are also buttons labeled 'EMS' and 'SPEED' on the handle.

PROTOCOLO DE TRABAJO

ORION XPRO

MICRO-NEEDLE CELLULAR ENERGY SYSTEM

MANIPULO

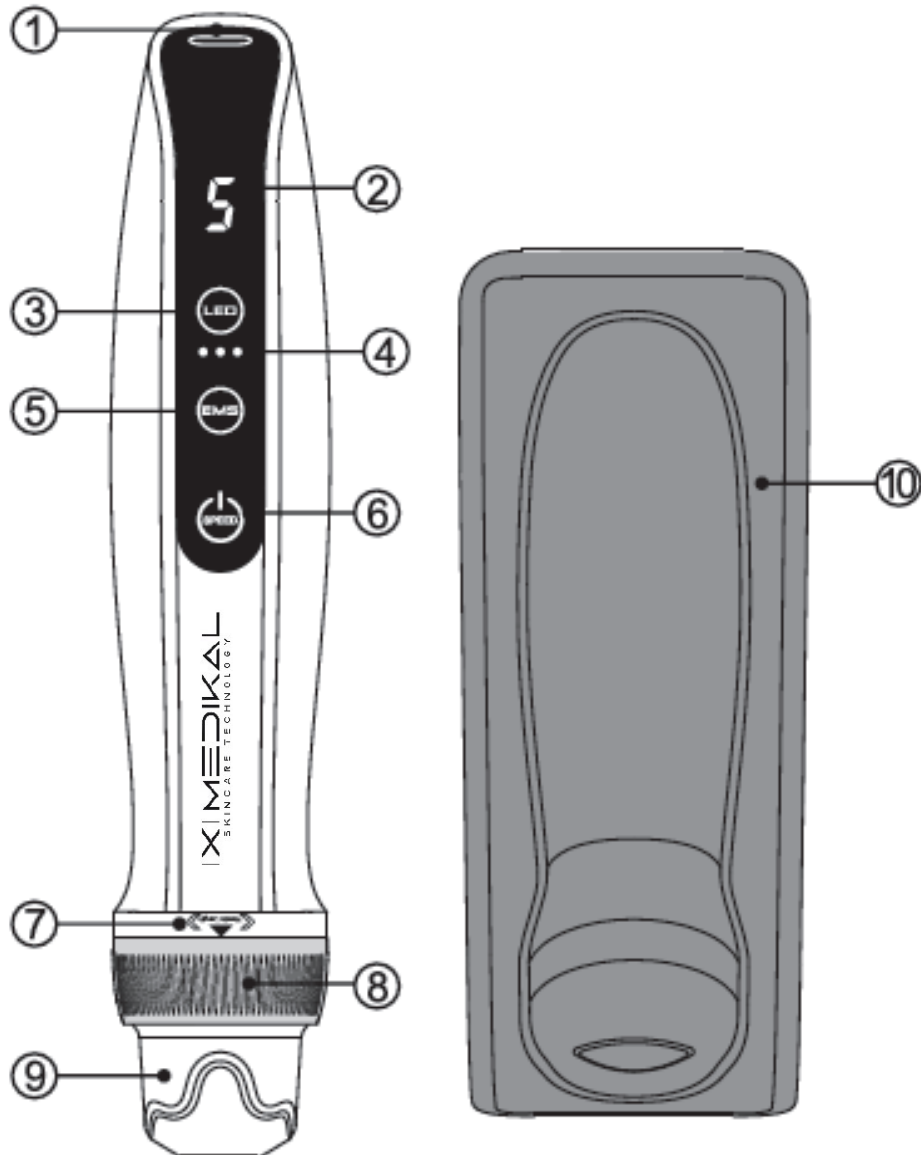

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| ① Interfaz de alimentación | ② Pantalla de velocidad |
| ③ Botón de LED | ④ Pantalla de intensidad EMS |
| ⑤ Botón de intensidad EMS | ⑥ Botón de potencia/velocidad |
| ⑦ Punto de escala | ⑧ Anillo de ajuste de la escala |
| ⑨ Cartucho de agujas | ⑩ Base inductiva |

MODO DE USO


Este dispositivo funciona con una batería integrada. Puede funcionar de forma inalámbrica. El cable de energía y el adaptador se utilizan para cargar el dispositivo cuando se queda sin batería.

MODO CARGA DE BATERÍA

Conecte el cable de alimentación con el adaptador a la interfaz de alimentación del dispositivo y conecte el adaptador a una toma de luz para cargar el dispositivo. La carga se completará en aproximadamente 3 horas.


El número de velocidad se destaca lentamente cuando la batería es de una capacidad inferior al 10%.

El bolígrafo se apagará automáticamente después de que el número de velocidades parpadee rápidamente durante 1 minuto.

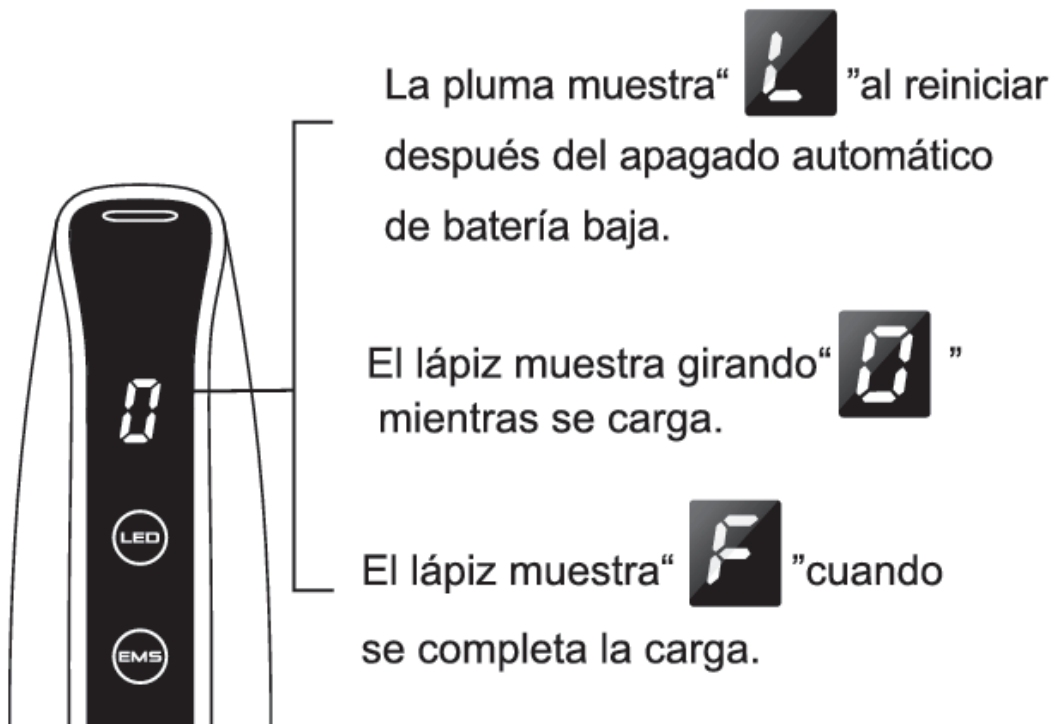


MONTAJE

Extraiga el cartucho de agujas del envase esterilizado (Fig1]

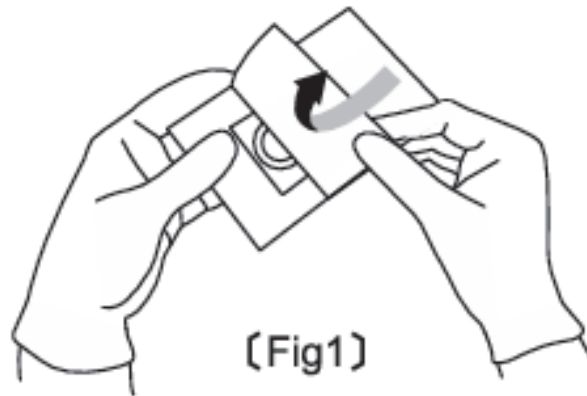

Coloque el cartucho de agujas en posición y bloquéelo ten el dispositivo girando el cartucho de agujas en el sentido de las agujas del reloj. [Fig2]

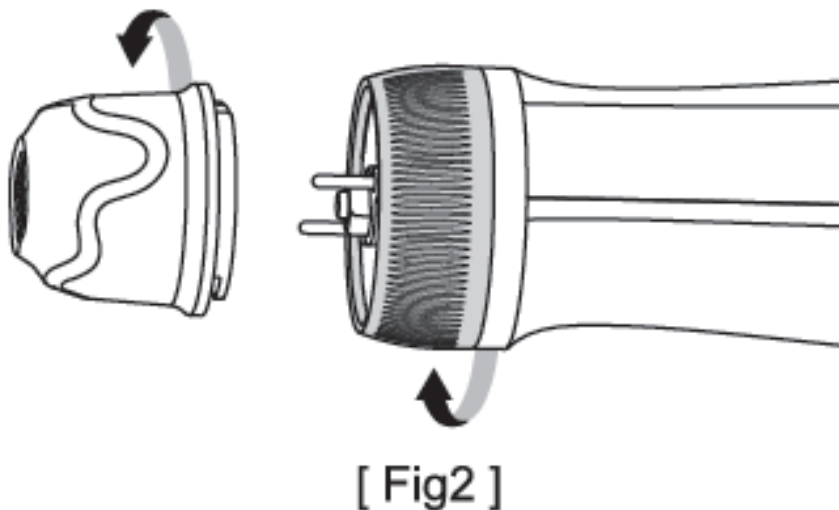

Gire el cartucho de agujas hacia la izquierda y tire de él hacia fuera cuando desee retirar el cartucho. [Fig2]

Ponga en marcha el aparato sólo cuando el cartucho de agujas esté montado correctamente. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar el aparato,

CONFIGURACION DEL TRATAMIENTO

HAY 3 NIVELES DIFERENTES PARA LA INTENSIDAD DE LA EMS.

Utilice la intensidad adecuada según el tratamiento y el tipo de piel. Cambie la intensidad de la EMS pulsando el Botón de intensidad de EMS. La intensidad de EMS varía con cada pulsación.

- Nivel 1 para la intensidad de EMS: 1 luz encendida (209,7HZ)
- Nivel 2 para la intensidad de EMS: 2 luces encendidas (229,7HZ)
- Nivel 3 para la intensidad de EMS 3 luces encendidas (269,7HZ)

La función EMS se cierra cuando todas las luces se apagan.

LUZ LED: ROJA/AZUL

Pulse el botón de la luz LED para encender o apagar la luz.

Pulsa el botón y enciende y selecciona la luz que quiere emitirse durante el tratamiento. Presionar el botón y aparece en el cartucho de las agujas, primero la luz azul, si se vuelve a presionar aparece la luz roja y con una tercera presión la luz se apaga.

5 MODOS DE VELOCIDAD

La Pantalla de velocidad: controla las revoluciones por minuto a las que ejecutamos el micro-needling posee 5 velocidades

Para poder ajustar esta velocidad debemos presionar el botón de encendido/ velocidad (6) de forma no fija.

Estas velocidades hay que adaptarlas a la velocidad de nuestra mano al pasar por la piel, y a la sensibilidad del cliente cuanto más velocidad menos se percibe, por lo tanto disminuye el dolor.

BOTON DE ENCEDIDO Y APAGADO

Presionar el botón para encender el bolígrafo. Si se presiona de forma rápida sube la velocidad del micro needling y aparece señalado en el punto 2 Pantalla de velocidad. Si se mantiene presionado durante unos segundos se apaga.


En el caso de querer dejar en pausa al bolígrafo colocar en su base.

AJUSTE DE LA LONGITUD DE LA AGUJA

Ajuste de la longitud de aguja

Use el tamaño de aguja adecuado según las diferentes áreas de tratamiento y problemas de la piel.

Ajuste la profundidad de la aguja girando el anillo de ajuste de la escala. La profundidad de la aguja debe ajustarse después de encender el lápiz. El número de escala que se alinea con el punto de escala muestra la profundidad actual de la aguja.

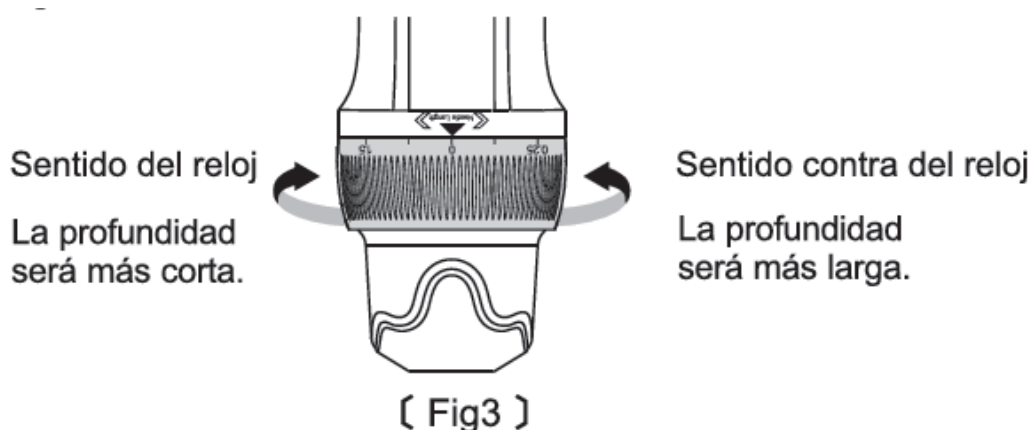

TIPOS DE CARTUCHOS DE RECAMBIO



9 PINS



Utilizados para tratamientos localizados en áreas pequeñas, como la reducción de cicatrices de acné y el aclarado de manchas oscuras



14 PINS



Se utilizan para el tratamiento de líneas de Cabello escasas o para aumentar la densidad del cabello, promoviendo el crecimiento del cabello a lo largo de la línea del cabello,



25 PINS



Se utiliza para el cuidado de la piel de todo el rostro o para problemas cutáneos de mayor envergadura, como el blanqueamiento de la piel, la reducción de cicatrices de acné, el tratamiento de cicatrices, el aclarado de manchas oscuras y la minimización de estrías.

CONTRAINDICACIONES

Es importante verificar que el cliente no posee las siguientes contraindicaciones:

-  Clientes con antecedentes de enfermedades de la piel y cáncer
-  Pacientes con otras enfermedades crónicas, como cardiopatías, diabetes.
-  Pacientes con Herpes.
-  Acné en estado infeccioso o Inflamatorio.
-  Enfermedad en período de inflamación.
-  Pacientes que están tomando Anticoagulantes.
-  Enfermedades importantes del sistema circulatorio.
-  Heridas en la piel
-  Peeling profundo (15 días después)
-  Verificar alergias de activos
-  Contraindicaciones limitadas a las corrientes EMS:
-  Clientes que tengan marcapasos y desfibriladores en su cuerpo
-  Clientes con placas metálicas debajo de la piel
-  Clientes embarazadas

PRODUCTOS

Es necesario el uso de activos dirigidos y especializados para la técnica de needling que sean asépticos y no provoquen ninguna intolerancia e incompatibilidad o agresión a la piel.

Los productos se dividen en las tres etapas del tratamiento: Preparación, introducción en la piel, reparación.

PREPARACION



Utilizar para reducir el grosor de la capa córnea flexibilizar la piel para una Buena introducción de las agujas y mantener la piel aséptica el salicilic removing en el caso de trabajo en facial y corporal o el hair peel en el caso del cuero cabelludo

TRATAMIENTO FACIAL

Se puede mezclar hasta 3 ampollas o solo utilizar 1 coctel o mezclar un biorevitalizante con una ampolla



AMPOLLAS

Potenciador: Dexphantenol, silicio orgánico
Piel grasa: Biotin hidroxin, Vitamina A, Oligoelements
Hidratar: Ácido hialurónico al 1% o 2%, Centella Asiática
Circulación sanguínea: Ginkgo Biloba, Laureth
Antioxidantes: Glutathione, Vitamina C, AEC, B complex
Firmeza: DMAE, Condintrin mesoplus, Ácido hialurónico + DMAE
Arrugas: combinar ampollas antioxidantes con hidratantes y Argilerine.
Manchas: Tranexamicum, B-Complex, Glutathione
Contorno de ojos: Ginkgo biloba, Mellilotus, Ácido hialurónico 3,5%

ORION XPRO

MICRO-NEEDLE CELLULAR ENERGY SYSTEM



COCKTAILS

Antiaging: antiedad global todo el rostro y contorno de ojos.

Skin repair: Protección antiedad, reparación de marcas

Whitening: Luminosidad , color , manchas muy superficiales

MelanoOut: Hiperpigmentación por edad fotoenvejecimiento o secuelas

Contour: Reafirmante, ojeras, drenante



BIOREVITALIZACIÓN

Lipolytic Plus: Ayuda a remodelar el contorno corporal. Reductor

LipoFirming : Estimula los fibroblastos reafirmante) Antioxidante

Fat Burner: Grasa localizada, celulitis y retención de líquidos.

Cellulite: Lipolitico, anticelulítico y reafirmante

TRATAMIENTO CORPORAL

Se puede mezclar hasta 3 ampollas o solo utilizar 1 coctel o mezclar un biorevitalizante con una ampolla



AMPOLLAS

Potenciador: Serum Solution Ayuda a romper las células de grasa. Para mezclar ampollas y aumentar la dosis en corporal

Circulación sanguínea: Meliloto

Drenante: Alcachofa, Centella asiática

Celulitis: L-Carnitina, Cafeína 10%, Deoxycholic 10%

Grasa localizada: Cellestaby, Fosfatidicolina, Hyaluronidasa

Estrías Colageno piruvato, Centella asiática



COCKTAILS

Potenciador: Serum Solution Ayuda a romper las células de grasa. Para mezclar ampollas y aumentar la dosis en corporal

Circulación sanguínea: Meliloto

Drenante: Alcachofa, Centella asiática

Celulitis: L-Carnitina, Cafeína 10%, Deoxycholic 10%

Grasa localizada: Cellestaby, Fosfatidicolina, Hyaluronidasa

Estrías Colageno piruvato, Centella asiática



BIOREVITALIZACIÓN

LIPO SCULPT FACTOR + HA: Reductor de celulitis y la grasa localizada. Mantiene la firmeza.

DEOXYCHOLIC + HA: Grasa localizada en muslos, glúteos, abdomen

PPC PERFECT FORM + HA: Grasa localizada o celulitis fibrosa

COFFEE + HA: Celulitis adiposa, grasa localizada

CLH LIPASE + HA: Para potenciar los resultados de aparatología contra la grasa y celulitis. Antes de la cavitación, después de la radiofrecuencia.

TRATAMIENTO CAPILAR

Se puede mezclar hasta 3 ampollas o solo utilizar 1 coctel o mezclar un biorevitalizante con una ampolla



AMPOLLAS

Potenciador: **Dexpantenol**

Cabello sano, brillante y sin alopecia

Circulación sanguínea: Ginkgo Biloba 4%

Alopecia androgénica : Ginkgo Biloba 4%, dexpantenol

Caída de cabello por seborrea: Biotin Hidroxin



COCKTAILS

Hair: Caída de cabello. Fortalece los folículos su estructura y promueve el crecimiento folicular



Hair: Caída de cabello. Fortalece los folículos su estructura y promueve el crecimiento folicular

ORION XPRO

MICRO-NEEDLE CELLULAR ENERGY SYSTEM

TECNICAS DE NEEDLING

Las técnicas de needling están dirigidas a tratar los relieves de la piel, en el rostro es donde adquirimos más técnicas para tratar el poro, arrugas, flacidez etc... mientras que en el cuerpo o cuero cabelludo solo se utiliza una.




Es importante que para que la penetrabilidad de las agujas sea la correcta deben:

- Que el bolígrafo esté colocado de forma perpendicular a la piel y no de forma inclinada.
- Que la mano del profesional debe mantenerse sin presión durante su paso por la piel para evitar lesiones en la piel al no controlar la profundidad real.

Las técnicas se pueden repetir 4 o 5 veces por zona y las utilizadas son:

1. Mallado genera una activación de todo el tejido ante zonas de la piel donde queramos trabajar todo a la vez arrugas, poro, flacidez. También es la forma habitual de trabajar las zonas corporales o el cuero cabelludo sin prácticamente pelo.
2. En forma de circular como una espiral dirigida para tensar el tejido se utiliza en pómulos y cuello. Cuando se desea tratar el poro dilatado también ejercer un circo que se agrande y se encoja como una espiral fija.

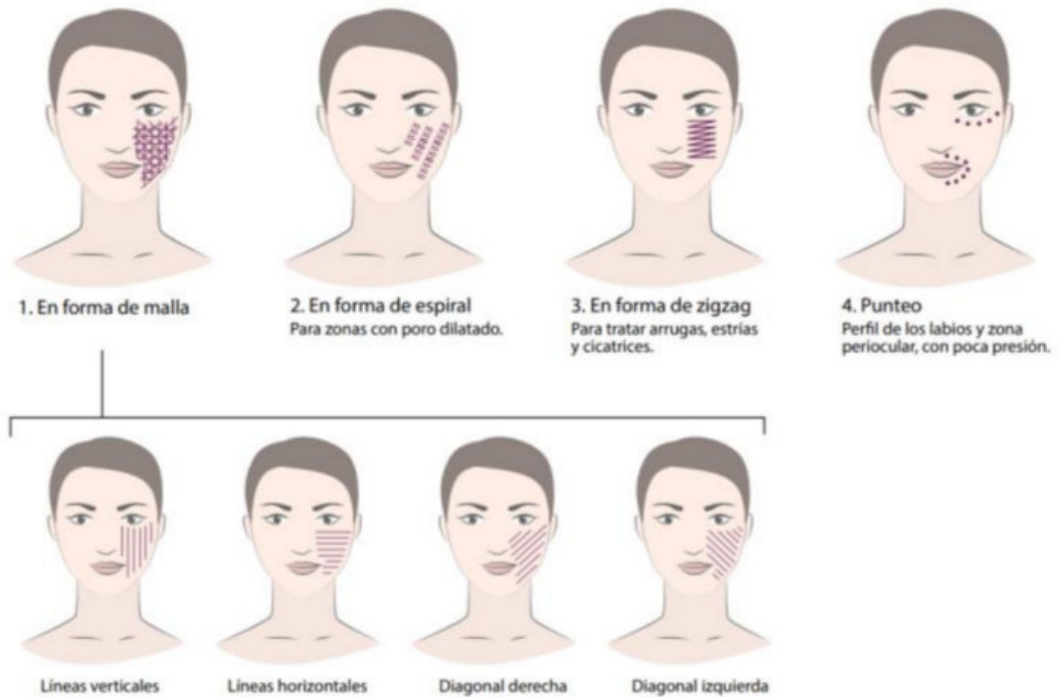

3. En forma de zigzag: Arrugas, estrías, cicatrices.

4. Punteo perfil de los labios y zona periocular, también se utiliza para introducir activos con densidad o exclusivos para tratar por ejemplo manchas

En el cuero cabelludo con cabello utilizar la forma lineal y en zigzag: Ejemplo ir haciendo líneas con un peine y trabajar primero en forma ida y vuelta y después en zig zag

PROTOCOLO

FACIAL



Uso específico en cabina: Realizar en cura de 4 sesiones 1 vez cada 15 días.

Se puede combinar con otros tratamientos.

Tiempo de tratamiento 1h.

Etapa	Producto necesario	Desarrollo
Limpiar la piel	Cleaving milk Tonic	Desmaquillar el rostro cuello y escote con la leche desmaquillante y perfeccionar la limpieza con el tónico
Preparar la piel	Salicilic removing	Aplicar con una gasa Salicilic Removing (5ml) primero impregnando la piel con el producto y después generando una suave fricción, por todas las áreas faciales.
Orion Xpro	Preparado de ampollas específico al trabajo a realizar en la piel La cantidad es de 10ml aproximadamente por tratamiento.	Programar Orion Xpro a la zona de trabajo. Aplicar con pincel y comenzar el tratamiento por frente pómulos para acabar por orbicular de boca y ojos. Recordar hacer las técnicas de malla (en el caso de zonas muy afectadas) , circular (poro dilatado), espiral (hilo tensor), zigzag (arrugas) o punteo (introducción de activo de forma local) según la superficie de la piel y lo que se desee trabajar. Impregnar continuamente las zonas. Controlar todo el rato los parámetros y la reacción de estos en la piel.
Protección	Oxigel / velo MCCM+ aplicar martillo de hielo	Aplicar oxigel (5ml) o la mascarilla velo para calmar durante 10 o 15 minutos. Si durante este tiempo se posee un martillo frío (Hydralinfusión, Tactum) potenciar el tratamiento con la incorporación del manípulo, en este caso con 10 minutos sería suficiente Retirar la mascarilla o en el caso de oxigel humedecer los dedos con agua fría masajear y aclarar
	Suero Xmedical X1. Hialuronic / serum hidra repair sos	Acabar con la aplicación de un suero dirigido de la línea Xmedical. Es idóneo para tratar la incomodidad y reparación de la piel las primeras 24 h puede utilizarlo a demanda de la piel.

ORION XPRO

MICRO-NEEDLE CELLULAR ENERGY SYSTEM

A tener en cuenta el cliente después de la sesión

- Después del tratamiento el área tratada se encuentra sensibilizada, dependiendo de la agresión y el tipo de piel, está sensibilidad dura entre 3 y 24h. Momento en que se activan todos los procesos de cicatrización y regeneración de la piel. Durante este tiempo recomendamos utilizar a demanda de la piel el Suero Xmedical X1. Hialuronic / serum hidra repair sos.
- No exponerse a ninguna fuente de calor o exposiciones solares es de vital importancia para no tener efectos secundarios no deseados.
- Aplicar cremas de acción regeneradora más la acción adecuada a cada tratamiento a la vez de aplicaciones regulares del protector es importante para un resultado optimo.

CORPORAL



Uso específico en cabina: Es necesario realizarlo después de la sesión de aparatología para introducir principios activos específicos en zonas más rebeldes. Se realizar 1 vez cada 15 días.

Tiempo de tratamiento 10 a 15 minutos según la zona a tratar.

Etapa	Producto necesario	Desarrollo
Preparar la piel	Salilic removing	Aplicar con una gasa Salilic Removing (5ml) primero impregnando la piel con el producto y después generando una suave fricción, por todas el área corporal elegida.
Orion Xpro	Preparado de ampollas específico al trabajo a realizar en la piel La cantidad es de 10ml aproximadamente por tratamiento.	Programar Orion Xpro a la zona de trabajo Aplicar con pincel y comenzar el tratamiento con la técnica de mallado (en el caso de zonas con celulitis) o zigzag (estrías o cicatrices) . Impregnar continuamente el área de trabajo. Controlar todo el rato los parámetros y la reacción de estos en la piel.
Acabar si la piel esta muy irritada con la aplicación de un suero X1 X1. Hialuronic / serum hidra repair sos		

A tener en cuenta el cliente después de la sesión

- Después del tratamiento el área tratada se encuentra sensibilizada, dependiendo de la agresión y el tipo de piel, está sensibilidad dura entre 3 y 24h. Momento en que se activan todos los procesos de cicatrización y regeneración de la piel.
- En ocasiones pueden salir pequeñas lesiones em forma de costra que enseguida se reparan.
- No exponerse a exposiciones solares..

CUERO CABELLUDO



Uso específico en cabina: Se realizar 1 vez cada 15 días.
Tiempo de tratamiento 30 minutos según la zona a tratar y la cantidad de pelo .

Etapa	Producto necesario	Desarrollo
Preparar la piel	Hair peel	Protegernos las manos con guantes. Aplicar con el spray hacia el cuero cabelludo el hair peel y movilizar el cuero cabelludo con una ligera fricción corta con nuestros dedos.
Orion Xpro	Preparado de ampollas específico al trabajo a realizar La cantidad es de 10ml aproximadamente por tratamiento introducirlo en una jeringa	Programar Orion Xpro a la zona de trabajo - Con cabello: con la ayuda de un peine abrir una línea en el centro de la cabeza impregnar la línea con la ayuda de la jeringa y realizar dos pasadas en línea y 2 en zigzag. Realizar esta misma operación por todo el cuero cabelludo. - Sin cabello: aplicar con pincel y comenzar el tratamiento con la técnica de mallado todo el área de trabajo. Impregnar continuamente el área de trabajo. Controlar todo el rato los parámetros y la reacción de estos en la piel.
Acabar pulverizando Hair Grow sobre el cuero cabelludo y realizando un ligero masaje craneal.		

A tener en cuenta el cliente después de la sesión

- Después del tratamiento el área tratada se encuentra sensibilizada, dependiendo de la agresión y el tipo de piel, está sensibilidad dura entre 3 y 24h. Momento en que se activan todos los procesos de cicatrización y regeneración de la piel.
- Es recomendable utilizar Hair Grow durante las horas posteriores y una vez al día de forma cotidiana, para favorecer el crecimiento del cabello.
- No exponerse a exposiciones solares

FICHA TECNICA

Nombre del equipo	ORION XPRO
Imagen	
Voltaje de entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz
Clasificación de potencia de entrada fuente de alimentación	5 V 1A

PRECAUCIONES

- AGUJAS:

El cartucho de la aguja es desechable.

Las agujas usadas debe desecharse aun contenedor de basura.

Extreme la precaución de no contaminar las agujas que van a ser utilizadas durante el tratamiento.

Las agujas de Orion Xpro son exclusivas.

- MANTENIMIENTO GENERAL

Inspeccione el dispositivo y el cargador antes de usarlo, en el caso de ver roturas o alteraciones póngase en contacto con el servicio técnico.

Asegúrese de que el bolígrafo este totalmente cargado antes de un tratamiento.

No utilizar desinfectantes o detergentes fuertes para limpiar el dispositivo y su base, es mejor limpiar con un trapo seco o ligeramente húmedo.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ORIOM XPRO

Oriom Xpro es una terapia medico estética innovador de última generación , que combina tres tecnologías en un solo equipo: Micro-needling, corrientes EMS y terapia de luz. Con Orion XPro puedes ofrecer una solución mínimamente invasiva para tratamientos estéticos y ofrecer una solución integral para mejorar la estética de la piel.

Sus **resultados** son inmediatos sobre todo a partir de las 24h. posteriores. Con Orion XPro para tratamientos dirigidos a reducir el envejecimiento, conseguir un tono de piel uniforme y mejorar la textura de la piel incluso reducir el poro o las manchas, estimular el crecimiento del cabello y mitigar la aparición de cicatrices y estrías

El tratamiento con Oriom Xpro se basa en la sinergia de la técnica de micro-needling con las tecnologías de las corrientes EMS y la luz azul o roja. El uso del micro needling (micro filamentos) que producen micro lesiones controladas en la piel, estimulando la liberación de diversos factores de crecimiento que provocan la creación de células y generan nuevas estructuras de tejido en forma de fibras de colágeno y elastina, además de la introducción de activos. Unida a la electroporación que mejoran la penetrabilidad de los activos, estimula la recuperación muscular y son sedativas . Y por último se combinan con luz LED roja para la estimulación de la producción de colágeno o la luz azul a las bacterias que causan el acné, reduciendo los brotes y la inflamación lo que resulta en una mejor textura, tono y claridad.

Es importante saber que ciertas pieles pueden presentar rojeces momentáneas tras el tratamiento, incluso inflamación, esto es gracias a la activación de los procesos de regeneración. Verificar no tener alergias a las sustancias activas a utilizar durante el tratamiento y confirmar no tener **contraindicaciones** como son: embarazo, heridas, herpes o infecciones en la piel en el caso de poseer placas metálicas o marcapasos o estar embarazada eliminar el uso de corrientes EMS.

El tratamiento se debe **realizar** cada 15 días y en determinadas pieles, se combina con otras técnicas que estipule la profesional. La **duración** de la sesión es de 50 minutos, repartidos en preparación de la piel, desempeño de la técnica y finalización protección.

Después del tratamiento la piel debe permanecer limpia, no utilizar cosméticos en las 12 h. posteriores y evitar el contacto con fuentes de calor, sol y roces sobre las áreas tratadas. A partir de las 24h. la penetración de los activos y la etapa de regeneración es óptima. La piel está más homogénea, sana y joven.

Los **resultados** se notan desde la primera sesión pero dependiendo del diagnóstico variará la media de tratamientos necesarios en función de la severidad del problema. Su número de sesiones es _____ y se realizarán _____ tratamientos, combinando en su caso las tecnologías _____.

Para obtener los mejores resultados posibles es importante que acuda a todas las citas expuestas de tratamiento y combinar la terapia con productos dirigidos y prescritos por su esteticista.

El resultado de cualquier tratamiento depende del metabolismo cutáneo de cada persona. Por ello, es lógico entender que la velocidad a la que van a conseguir el resultado, así como el resultado final, no se pueden predecir con exactitud. Para ayudar a la verificación del resultado puede ser documentado con fotografías y o filmaciones siempre guardando su privacidad.

Este equipo ha sido concebido únicamente para ser aplicado con fines estéticos, sobre una piel sana y sin heridas. En caso de duda se debe consultar a un médico.

He leído todas las explicaciones y recomendaciones que aparecen en este consentimiento informado en relación con Global lift. Comprendo las ventajas y las limitaciones del tratamiento. Acepto seguir las recomendaciones que me haga el Instituto

_____ para obtener los mejores resultados posibles. Entiendo la explicación y las medidas para hacer el tratamiento con seguridad.

Nombre: _____ Apellidos: _____

DNI: _____ Teléfono _____

En _____ a _____ de _____ del _____

Firma: _____





SKINCARE

XMK

IXIMEDIKAL

TECHNOLOGY