



FUSION PLASMA

FUSION PLASMA

X MEDIKAL, en su constante empeño por la innovación y la integración de los más recientes avances y estudios en el campo científico, se une a Fusión Plasma para presentar su equipo más reciente, el cual fusiona las tecnologías de plasma frío y plasma caliente.

La tecnología de fusión de plasma se basa en la utilización de un estado de la materia conocido como plasma. A diferencia de los sólidos, líquidos y gases, el plasma es un gas ionizado que contiene una mezcla de electrones libres y iones positivos, lo que le confiere propiedades únicas. En el contexto de aplicaciones estéticas, se ha descubierto que el plasma puede ser manipulado en diferentes temperaturas para obtener beneficios específicos.



FUSION PLASMA

El estado plasmático de una materia posee una carga alta de energía eléctrica. Los átomos están ionizados, es decir, han perdido o ganado electrones y se han convertido en iones. Es el estado de la materia más común del universo y se encuentra en las estrellas, el sol, los rayos, entre otros.

FUSION PLASMA™ es la fusión de **plasma frío** y **plasma templado** para atender diversas necesidades dermatológicas, priorizando al mismo tiempo la seguridad y satisfacción del cliente.

PLASMA FRÍO: es el estado plasmático del Gas Argón (30° - 70°). Este gas tiene como característica que el plasma frío se vean rayos azules. Ofrece efectos antibacterianos, antiinflamatorios y regenerativos sin causar daño por calor. Provoca una reacción química y eléctrica en el tejido que **elimina el estrés oxidativo de la célula** entre otras muchas de sus funciones.

- El plasma frío ioniza los gases mediante energía eléctrica. Este proceso produce radicales libres de alta energía, ozono y otras especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Estas partículas dañan las paredes y el ADN de las células bacterianas, destruyéndolas o impidiendo que se multipliquen.
- El plasma frío funciona a temperaturas muy bajas, lo que evita el daño térmico a la piel.
- Las células comienzan a dividirse más rápidamente con la estimulación eléctrica y química de bajo nivel creada por el plasma, lo que acelera la renovación de la piel al permitir la producción de colágeno en la piel.
- El plasma frío dilata los vasos sanguíneos de la superficie de la piel en la zona donde se aplica, lo que aumenta la circulación sanguínea debajo de la piel, lo que permite que llegue más oxígeno y nutrientes a la zona
- El plasma frío estimula las células cutáneas para aumentar la producción de lípidos. Esto fortalece la barrera lipídica, que forma la capa externa de la piel y evita la pérdida de humedad. Hace que la piel sea resistente a los factores externos.

El uso del PLASMA FRÍO en medicina estética tiene múltiples funciones:

1. **Esterilización de la piel y reducción bacteriana:** Mata las bacterias dañinas en la superficie de la piel.
2. **Aceleración de la cicatrización de heridas:** Acelera el proceso de curación estimulando la regeneración celular.
3. **Tratamiento antiinflamatorio:** Reduce la inflamación de la piel, eficaz para el eczema, la psoriasis y la piel sensible.
4. **Tratamiento de acné:** Trata el acné activo esterilizando la piel y acelera la cicatrización de las cicatrices.
5. **Reducción de arrugas y rejuvenecimiento de la piel:** Mejora la elasticidad de la piel y reduce las líneas finas estimulando los procesos de curación naturales de la piel.
6. **Tratamiento de la psoriasis y el eczema:** Trata afecciones crónicas de la piel reduciendo la inflamación y promoviendo la regeneración de la piel.

- 7. Tratamiento del vitíligo:** El plasma frío reduce la inflamación y favorece la repigmentación estimulando la regeneración cutánea. Puede combinarse con plasma caliente.
- 8. Quemaduras (herpes simple, culebrilla, etc):** El plasma frío acelera la curación, promueve la regeneración celular y reduce el riesgo de infección al esterilizar el área.
- 9. Dermatitis (atópica, de contacto, etc):** El plasma frío alivia la inflamación y acelera la curación, reduciendo el picor y el enrojecimiento.
- 10. Tratamiento de la rosácea:** El plasma frío reduce el enrojecimiento, la hinchazón y la irritación, calmando la piel y mejorando su condición.
- 11. Infecciones fúngicas de la piel (piel de atleta):** El plasma frío altera las células fúngicas, reduce su crecimiento y promueve la curación de afecciones.
- 12. Fortalecimiento y crecimiento del cabello:** El plasma frío funciona generando especies reactivas de oxígeno y nitrógeno que interactúan con el cuero cabelludo y los folículos pilosos, fortaleciendo, estimulando y mejorando la salud del cuero cabelludo.

PLASMA TEMPLADO (120°C - 180°C): El **plasma** es un gas ionizado a altas temperaturas. A estas temperaturas, los electrones se desprenden de los átomos formando un gas ionizado.

El **plasma templado** utiliza calor para **crear microlesiones** controladas en la piel. Estas lesiones estimulan la producción de colágeno y elastina, lo que desencadena el proceso natural de curación y regeneración de la piel. Proporciona resultados efectivos para el **rejuvenecimiento** y el **ensado de la piel** con un tiempo de curación y riesgo moderados, lo que lo hace adecuado para la mayoría de los tipos de piel, incluida la piel oscura y seca, con el cuidado adecuado.

Tiene un tiempo de **recuperación entre 5 y 10 días**, durante los cuales se forman pequeñas costras que se curan. Los **resultados completos son visibles en 2 a 4 semanas**.
Adecuado a todo tipo de piel con resultados duraderos.

El uso del PLASMA CALIENTE en medicina estética tiene múltiples funciones:

1. **Microlesiones controladas:** el plasma caliente aplica calor controlado a 120 °C - 180 °C sobre la piel, lo que crea microlesiones. Estas microlesiones desencadenan el proceso de curación natural de la piel, estimulando la producción de nuevo colágeno y elastina, lo que tensa la piel, la rejuvenece y reduce las líneas finas.
2. **Estimulación de la producción de colágeno:** el daño inducido por el calor impulsa al cuerpo a producir más colágeno, mejorando la elasticidad de la piel y reduciendo los signos del envejecimiento.
3. **Estiramiento de la piel:** el plasma caliente envía energía térmica a las capas más profundas de la piel, lo que hace que las células de la piel se contraigan y se tensen, haciendo que la piel luzca más firme, especialmente en áreas con piel flácida o suelta.
4. **Reducción de líneas finas y arrugas:** La exfoliación suave causada por el calor ayuda a reducir las líneas finas y las arrugas, dando como resultado una piel más suave y de aspecto más joven.
5. **Exfoliación suave (Peeling):** el plasma tibio proporciona una exfoliación ligera al eliminar las células muertas de la superficie de la piel, revelando una capa de piel nueva y más fresca.
6. **Renovación de la piel:** Las células cutáneas dañadas se reemplazan por células nuevas y saludables, mejorando la textura y el tono de la piel y al mismo tiempo reduciendo los problemas de pigmentación.
7. **Reducción de estrías:** Reduce la aparición de estrías promoviendo la regeneración de la piel en 2-3 sesiones dependiendo de la profundidad.
8. **Tratamiento de hiperpigmentación:** Aclara las manchas oscuras exfoliando las capas superiores de la piel en 2-3 sesiones espaciadas en 4 semanas entre sí.

FUSION PLASMA


FUSION PLASMA. DISPOSITIVOS

FUSION PLASMA™ contiene 6 dispositivos en la modalidad de plasma frío y 4 en plasma caliente. Cada uno de estos dispositivos se elegirán dependiendo del tratamiento que se realice y el área a tratar.

HYPERPLASMA

Hyper Plasma es un tratamiento revolucionario que revitaliza y rejuvenece la piel a través de tecnología de plasma frío.

- Estimula la producción de colágeno.
- Optimiza la circulación sanguínea y el oxígeno,
- Mejorando así la textura y el tono de la piel sin requerir tiempo de recuperación.
- Características calmantes que contribuyen a disminuir la inflamación, lo que lo convierte en una opción excelente para personas que sufren de **acné, eccema y psoriasis**.

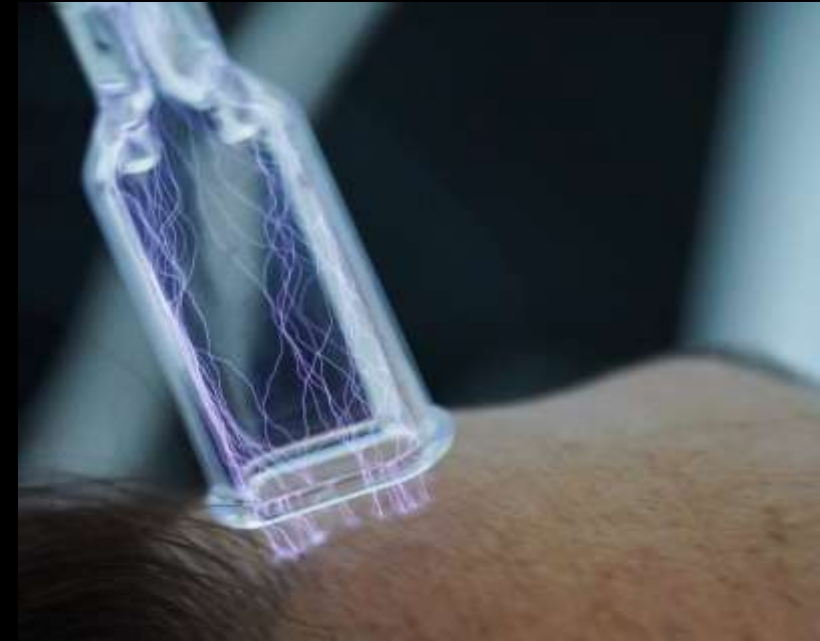

SCALP PLASMA

El SCALP PLASMA al aplicarse sobre el cuero cabelludo, el plasma frío provoca reacciones químicas que liberan factores de crecimiento y otras moléculas bioactivas. Estas moléculas ayudan a dilatar los vasos sanguíneos, aumentando el flujo sanguíneo en la zona tratada. SCALP PLASMA genera una activación de los folículos pilosos y se favorece el desarrollo de nuevos cabellos.

Reduce la inflamación y el estrés oxidativo en el cuero cabelludo, favoreciendo la regeneración celular y fortaleciendo los folículos pilosos.

SCALP PLASMA es una tecnología segura y se adapta a diferentes tipos de cabello y condiciones del cuero cabelludo, incluidos aquellos con cueros cabelludos sensibles.

Los beneficios del uso del plasma frío en el tratamiento del cabello han sido respaldados por varios estudios clínicos que destacan su eficacia en condiciones como la **alopecia areata** y el **efluvio telógeno**.



PLASMA JET

EL PLASMA JET utiliza Cold Plasma Jet para desinfectar piel, sanar heridas y eliminar microorganismos como bacterias y hongos, superando a métodos convencionales.

- **Esterilización de la Piel.** El plasma frío, al generar especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, destruye células patógenas de manera efectiva.
- **Sanación de Heridas .** El plasma frío acelera la cicatrización de heridas y mejora la regeneración tisular. Es beneficioso en heridas crónicas, como úlceras diabéticas, reduciendo tiempos de recuperación y mejorando la calidad de vida del paciente,
- **Erradicación de Hongos.** Las infecciones fúngicas, difíciles de tratar, encuentran en el plasma frío un enemigo eficaz. Ataca las estructuras fúngicas sin dañar tejidos sanos, siendo ideal para tratar infecciones **ungueales y dérmicas**.
- **Aplicaciones Localizadas y dermicas.** Plasma jet permite tratamientos precisos en áreas pequeñas, optimizando la acción del plasma frío y reduciendo efectos secundarios. También se exploran aplicaciones en cosmética y tratamiento de afecciones dermatológicas como **acné y rosácea**, gracias a sus propiedades antiinflamatorias.



DERMA PLASMA Y ROLLER PLASMA

La combinación de estas dos tecnologías en un solo dispositivo da lugar a un tratamiento integral en el envejecimiento cutáneo y otros problemas de la piel. El uso conjunto del Microneedling Derma Roller y el plasma frío permite obtener lo mejor de ambas técnicas: la estimulación mecánica y la desinfección avanzada, junto con un aumento de la regeneración celular y la mejora del aspecto exterior de la piel.

1. Microneedling Derma Roller (0.25 mm)

- Estimulación de Colágeno y Elastina.
- Reducción de Líneas Finas y Arrugas.
- Mejora de la Absorción de Productos.
- Reducción de Cicatrices e Hiperpigmentación.

2. Plasma Frío

- Eliminación de Bacterias del Acné.
- Reducción de Inflamación y Enrojecimiento.
- Fomento de la Regeneración Natural.
- Mejora de la Microcirculación.



La combinación del Microneedling Derma Roller y el plasma frío en un solo dispositivo ofrece un tratamiento integral para afrontar diversos signos de envejecimiento cutáneo y otros problemas dermatológicos. Este enfoque combinado proporciona:

- **Estimulación Mecánica y Regeneración Celular.** Acelera la renovación de la piel al combinar la estimulación física con las propiedades de regeneración del plasma frío.

FUSION PLASMA

OZONO JET PLASMA

La combinación del plasma de ozono utiliza las propiedades únicas del ozono, un gas compuesto por tres átomos de oxígeno, para tratar diversas afecciones cutáneas de manera segura y eficaz.


- 1. Corrección del Acné y Eccema :** El plasma de ozono actúa directamente sobre las bacterias responsables del acné, descomponiéndolas rápida y eficientemente sin el uso de químicos fuertes o procesos invasivos. Asimismo, al suavizar las inflamaciones y aliviar la piel irritada, ofrece un alivio apreciable para quienes sufren de eccema.
- 2. Regeneración Celular:** Uno de los aspectos más destacados de esta tecnología es su capacidad para promover la regeneración de células cutáneas. Al acelerar el recambio celular, la piel no solo se ve más joven y saludable, sino que también se fortalece la barrera natural de la dermis, protegiéndola contra factores ambientales agresivos y reduciendo el riesgo de futuras imperfecciones.
- 3. Elasticidad y Luminosidad :** Al fomentar la regeneración de colágeno, el plasma de ozono mejora visiblemente la elasticidad de la piel. Una piel más elástica es más resistente y tiene un aspecto más tonificado y joven. Además, el aumento en la producción de colágeno también contribuye a una tez que irradia naturalidad y vitalidad.



DIAMOND PLASMA

La innovación de la herramienta también radica en su diseño físico. La sonda, con forma de diamante y fabricada en cobre, asegura una cobertura uniforme de la piel. La elección del cobre no es aleatoria: sus propiedades antimicrobianas y térmicas contribuyen a mejorar la eficacia y la seguridad del tratamiento. La forma de diamante, por otro lado, permite un acceso más preciso a las áreas difíciles, asegurando que cada parte de la piel reciba la atención necesaria. Esta combinación de materiales y forma no solo multiplica los efectos rejuvenecedoras sino que también protege la piel de posibles daños durante el procedimiento.

DIAMOND PLASMA CALIENTE tiene una gran capacidad para minimizar las líneas finas y las arrugas, problemas comunes que muchos buscan resolver con procedimientos estéticos. Al trabajar sinérgicamente para estimular la producción natural de colágeno y elastina, la piel comienza a revitalizarse desde el interior. Este proceso reduce visiblemente las líneas finas, alisando la superficie cutánea sin la necesidad de inyecciones o cirugías.

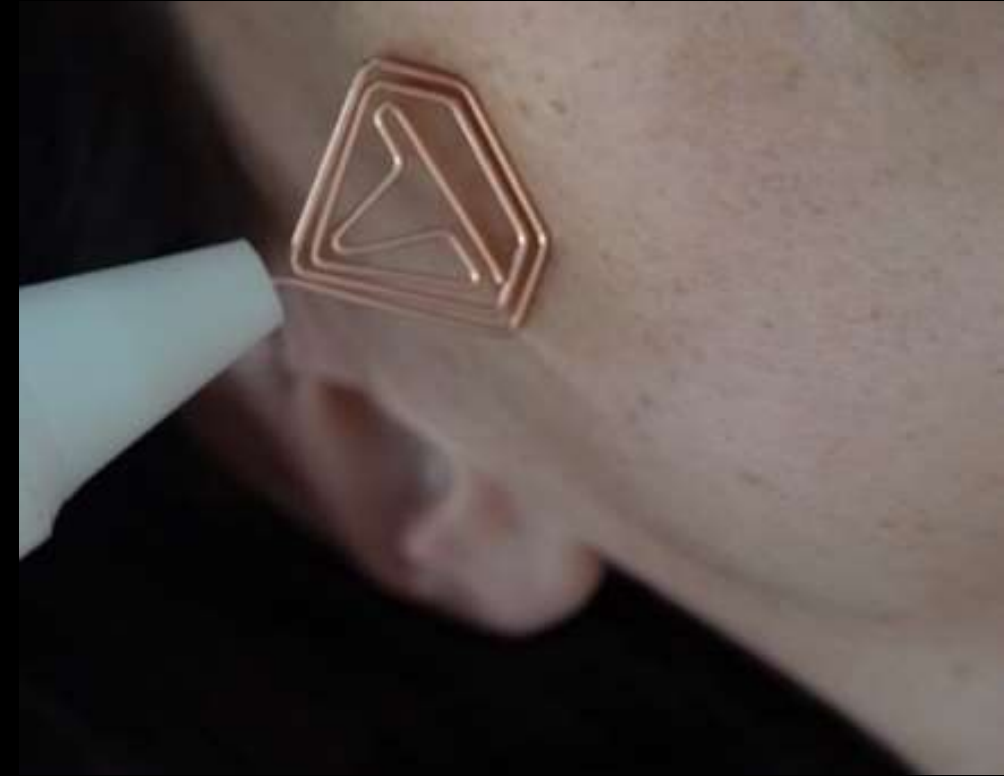


WARM PLASMA TIPS (PLATA O DORADO)

El tratamiento de **plasma templado** se realiza mediante un dispositivo que emite un arco de plasma pulsante. Este dispositivo cuenta generalmente con una **punta de acero inoxidable o cobre**, la cual se sitúa cerca de la piel, pero sin tocarla directamente. Al aplicarse, el arco de plasma crea un pequeño calentamiento controlado en las capas superficiales de la piel. Este calentamiento provoca **microlesiones**, pequeñas y controladas lesiones en las capas externas de la epidermis, que desencadenan un proceso de **regeneración** y **renovación celular**.

Entre los beneficios más destacados están la **reducción de líneas finas y arrugas**, la **atenuación de manchas** de la edad, y la **mejora en la textura**, el **tono** y la **claridad** de la piel. Además, la estimulación del colágeno resultante del tratamiento no solo proporciona un efecto inmediato de tensado, sino que también mejora progresivamente la apariencia de la piel con el tiempo.

Este procedimiento, dura aproximadamente 15 minutos y se considera generalmente seguro para la mayoría de los tipos de piel.

A pesar de ser un tratamiento no invasivo, el procedimiento debe ser realizado por profesionales capacitados para asegurar su efectividad y minimizar cualquier riesgo asociado. Aunque los efectos secundarios son raros, pueden incluir enrojecimiento, hinchazón temporal o costras superficiales que desaparecen rápidamente.

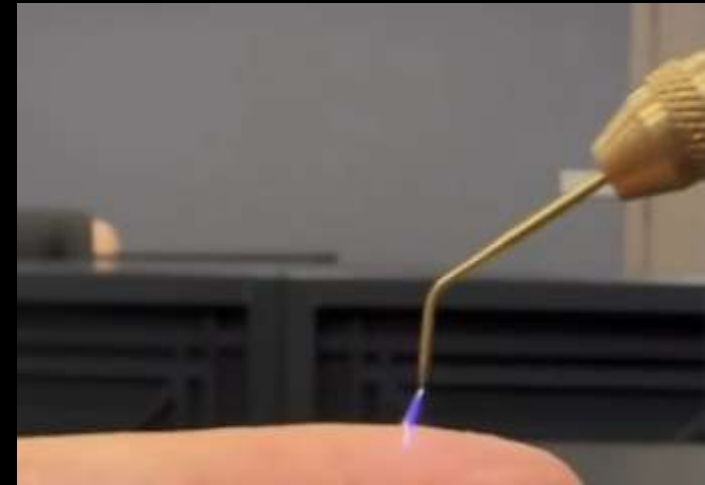

Protocolo de trabajo



FUSION PLASMA

FUSION PLASMA

TRATAMIENTOS PLASMA TEMPLADO

TRATAMIENTO	DISPOSITIVO	SESIONES	PROCEDIMIENTO
ESTIRAMIENTO Y LIFTING DE LA PIEL:	Agujas de acero	1-2 sesiones, cada 4-6 semanas, dependiendo de la zona y severidad de la flacidez.	Estimula la producción de colágeno y contrae la piel para tratar la piel flácida. Indicado para un enfoque suave y no invasivo con tecnología de plasma térmico, que brinda resultados antienvjecimiento con un tiempo de recuperación mínimo.
REDUCCIÓN DE LÍNEAS FINAS Y ARRUGAS:	Agujas de acero	2-3 sesiones, cada 4 semanas	Rejuvenece la piel y mejora la elasticidad para reducir las líneas finas y las arrugas. Indicado para mejorar la textura, el tono y la claridad de la piel mientras se tratan las arrugas y las manchas de la edad.
BLEFAROPLASTIA NO QUIRÚRGICA (LEVANTAMIENTO DE PÁRPADOS)	Aguja de oro	1-2 sesiones, cada 6-8 semanas	Tensa la piel alrededor de los párpados sin cirugía. Indicado para crear microlesiones controladas para estimular el colágeno en áreas delicadas como los párpados
REDUCCIÓN DE ESTRÍAS	Aguja de oro	2-3 sesiones, cada 6-8 semanas, dependiendo de la profundidad de la estría.	Reduce la aparición de estrías promoviendo la regeneración de la piel. Indicado para tratamientos más profundos como la reducción de estrías, donde se necesita una mayor producción de colágeno.

FUSION PLASMA

TRATAMIENTOS PLASMA TEMPLADO

TRATAMIENTO	DISPOSITIVO	SESIONES	PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DE LA HIPERPIGMENTACIÓN	Puntas de rodillo de Plasma Derma, (manchas superficiales) Agujas de acero (mancha profunda)	2-3 sesiones, cada 4 semanas.	Aclara las manchas oscuras exfoliando las capas superiores de la piel.
TRATAMIENTO DE LAS CICATRICES DEL ACNÉ	Agujas de oro (aguja de acero según preferencia)	3-4 sesiones, cada 3-4 semanas	Trata el acné activo y reduce las cicatrices promoviendo la renovación de la piel. El daño controlado creado por estas agujas ayuda a reducir las cicatrices al promover la producción de colágeno.
TRATAMIENTO TEXTURA Y ELASTICIDAD DE LA PIEL:	Punta de plasma de diamante	4-6 sesiones, cada 2-3 semanas	Mejora de la textura y elasticidad de la piel, tensa y reafirma el tejido epidérmico. Con la sonda de cobre en forma de diamante, esta punta está diseñada para mejorar la textura y la elasticidad de la piel a través de la tecnología de plasma térmico de bajo nivel.

TRATAMIENTOS PLASMA TEMPLADO

CUIDADOS POSTERIORES AL PLASMA CALIENTE

El cuidado posterior es fundamental para garantizar una curación óptima y evitar complicaciones. A continuación, se incluye una guía para el cuidado posterior adecuado después de un tratamiento con plasma caliente para garantizar un proceso de curación más fluido y mejorar los resultados del tratamiento con **Plasma Caliente**

- Evite la exposición al sol:
- Hidratación y humectación:
- No utilizar productos agresivos:
- Limpieza suave:
- Evite el calor y el sudor excesivos:
- No rascar ni hurgar:

FUSION PLASMA

TRATAMIENTOS PLASMA FRIO

TRATAMIENTO	DISPOSITIVO	SESIONES	PROCEDIMIENTO
ESTERILIZACIÓN DE LA PIEL Y REDUCCIÓN BACTERIANA	Yet Plasma- Hyper Plasma - Scalp Plasma	1 o 2 semanas para mantenimiento.	Mata las bacterias dañinas en la superficie de la piel, adecuado para pieles propensas al acné y para el cuidado de heridas. Indicado para aplicar
ACELERACIÓN DE LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS	Hyper Plasma	1-2 sesiones semanales, dependiendo de la gravedad de la herida hasta su total cicatrización.	Acelera el proceso de curación estimulando la regeneración celular. Indicado para la cicatrización de heridas, promoviendo una recuperación más rápida y reduciendo el riesgo de infección.
TRATAMIENTO ANTIINFLAMATORIO	Hyper Plasma, Scalp Plasma (cuero cabelludo)	3-4 sesiones, cada 1-2 semanas	Reduce la inflamación de la piel, eficaz para el eczema, la psoriasis y la piel sensible. Indicado para tratar afecciones inflamatorias de la piel, promueven la regeneración y reducen la irritación.
TRATAMIENTO DEL ACNÉ	Hyper Plasma - Yet Plasma	3-4 sesiones cada 4-5 días	Trata el acné activo esterilizando la piel y acelera la cicatrización de las cicatrices.
REDUCCIÓN DE ARRUGAS Y REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL	Hyper Plasma - Yet Plasma	4-6 sesiones cada 2-3 semanas	Mejora la elasticidad de la piel y reduce las líneas finas estimulando los procesos de curación naturales de la piel. Indicado con las pintas que combinan la microaguja y la terapia plasma frío y caliente para rejuvenecer y renovar la piel. Ideal para la reducción de arrugas.

FUSION PLASMA

TRATAMIENTOS PLASMA FRIO

TRATAMIENTO	DISPOSITIVO	SESIONES	PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS Y EL ECZEMA	Hyper plasma	4-6 sesiones cada 1-2 semanas dependiendo de la gravedad.	Trata afecciones crónicas de la piel reduciendo la inflamación y promoviendo la regeneración de la piel. Indicado para tratar afecciones crónicas de la piel, promover la curación y reducir síntomas como enrojecimiento e irritación.
TRATAMIENTO DEL VITÍLIGO	Ozono Plasma, Yet Plasma, Hyper Plasma, Aguja de acero	6-8 sesiones cada semana. Con sesiones de mantenimiento cada 2-3 meses si es necesario.	El plasma frío reduce la inflamación y favorece la repigmentación estimulando la regeneración cutánea. Puede combinarse con plasma caliente.
QUEMADURAS (HERPES SIMPLE, CULEBRILLAS, ETC)	Hyper plasma	2-3 sesiones cada semana hasta curar la quemadura. Sesiones de mantenimiento según sea necesario	El plasma frío acelera la curación, promueve la regeneración celular y reduce el riesgo de infección al esterilizar el área. Indicado para curar quemaduras al promover una recuperación más rápida y reducir el riesgo de infecciones secundarias.
DERMATITIS (ATÓPICA, DE CONTACTO, ETC)	Hyper Plasma- Scalp Plasma (cuero cabelludo) - Ozono Plasma	4-6 sesiones cada 1-2 semanas.	El plasma frío reduce la inflamación y la irritación, ayudando al proceso de curación durante los brotes. Indicado para tratar la dermatitis al reducir la inflamación y promover la curación de la piel

FUSION PLASMA

TRATAMIENTOS PLASMA FRIO

TRATAMIENTO	DISPOSITIVO	SESIONES	PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS	Hyper Plasma - Scalp Plasma (cuero cabelludo) - Ozono Plasma	4-6 sesiones cada semana con mantenimiento cada 2-3 meses.	El plasma frío disminuye la inflamación, acelera la curación y mejora la textura de la piel en las zonas afectadas por la psoriasis. Indicado para la inflamación y promueve la regeneración en el tratamiento de la psoriasis.
TRATAMIENTO DE LA ROSÁCEA	Hyper Plasma - Ozono Plasma	4-5 sesiones cada 1-2 semanas con mantenimiento cada 3 meses.	El plasma frío reduce el enrojecimiento, la hinchazón y la irritación, calmando la piel y mejorando su condición. Indicado por sus propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir los síntomas de la rosácea y promueven la curación de la piel.
ECZEMA (DERMATITIS ATÓPICA)	Hyper Plasma - Ozono Plasma - Agujas de acero	4-6 sesiones cada 1-2 semanas con mantenimiento si fuese necesario	El Plasma frío alivia la inflamación y acelera la curación, reduce el picor y el enrojecimiento.
CICATRICES POSTERIORES A QUEMADURAS:	Hyper Plasma, Agujas de acero o de oro	5-6 sesiones cada 3-4 semanas con sesiones de seguimiento.	El Plasma frío estimula la producción de colágeno, reduce el tejido cicatricial y promueve la regeneración saludable de la piel. Indicado para promover la regeneración de la piel sana. Alivio y reparación de quemaduras solares.

FUSION PLASMA

TRATAMIENTOS PLASMA FRIO

TRATAMIENTO	DISPOSITIVO	SESIONES	PROCEDIMIENTO
Alivio y reparación de quemaduras solares	Hyper Plasma	1-2 sesiones después de la exposición solar con tratamientos más frecuentes para quemaduras graves.	El plasma frío reduce la inflamación y el dolor, acelerando el proceso de curación natural de la piel. Indicado para tratamientos precisos, ayuda a reducir la inflamación relacionada con las quemaduras solares.
Heridas crónicas (por ejemplo, úlceras diabéticas, úlceras por presión)	Hyper Plasma	1-2 sesiones cada semana hasta lograr una curación significativa	El plasma frío esteriliza las heridas, reduce la inflamación y acelera la regeneración de los tejidos. Indicado para promover una cicatrización más rápida de las heridas y previenen infecciones en heridas crónicas.
Infecciones fúngicas de la piel (dermatofitosis)	Hyper Plasma - Yet Plasma - Ozono Plasma	3-5 sesiones cada 1-2 semanas dependiendo de la gravedad.	El Plasma frío altera las células fúngicas, reduce su crecimiento y promueve la curación de afecciones como el pie de atleta. Indicado para infecciones por hongos esterilizando y promoviendo la curación de los tejidos.
Infecciones fúngicas en los pies y las uñas (onicomicosis)	Hyper Plasma - Yet Plasma	4-6 sesiones cada semana. Seguimiento cada 2-3 meses.	El plasma frío esteriliza las áreas afectadas, reduciendo las infecciones por hongos y promoviendo el crecimiento del tejido sano.

